



Produkt	Desinfektionsmittel	Hersteller	Lösungskonz.	MLI	Testverlauf	Typ	Eignung	Datum
Biguacid Liquid	ja / yes	Antiseptica	Rein / pure	216	Nicht ok, starke Verhärtung / Not ok, strong hardening		nicht geeignet / non ok	08.04.16
Biguacid-S	ja / yes	Antiseptica	HDZ/Konzentrat HDZ/ concentrate	211	Konzentrat nicht ok, HDZ Mischung ok / Concentrate not ok, HDZ mixture ok		Konzentrat ok, gut abwaschen / Concentrate ok, wash well	10.07.15
Boat Master "Sky Care Kit" Sonnhaus Art. 950.188	ja / yes	Uniters Spa	Rein / pure	?	Reinigungsprodukt und Pflege Creme getestet / Cleaning product and maintenance cream tested	c	ok	24.11.15
Gese Pure	ja / yes	Keiser Medical	Rein / pure	215	Ok, leichte Verhärtung / Light hardening		Ok, gut abwaschen / rinse it properly	08.03.16
Diesin HG	ja / yes	ECOLAB	2%	199a	Leichter Rückstand / slight residue		ok	28.06.13
Diesin HG	ja / yes	ECOLAB	0.02	199b	Starke Verfärbung / severe discoloration		nicht geeignet / non ok	28.06.13
Dishguard 72	ja / yes	ECOLAB	5%	200a	Ok		Ok	28.06.13
Dishguard 72	ja / yes	ECOLAB	5%	200b	Ok		Ok	28.06.13
Dismozon Plus	ja / yes	Hartmann	Rein / pure	210	Ok		Ok, gut abwaschen / rinse it properly	10.07.15
FD 360	ja / yes	Dürr Dental	Rein / pure	204	ölige Rückstände auf Stamskin / oily residue on Stamskin		nicht geeignet / non ok	25.09.13
FD 366	nein / no	Dürr Dental	Rein / pure	203	Ok		Ok, gut abwaschen / rinse it properly	25.09.13
Globadean	ja / yes	Globasid	40%	201	Ok		Ok, gut abwaschen / rinse it properly	09.09.13
Hüsella top fit	nein / no	Hüser van Zwoil	0.4	206	weisse Rückstände, starke Verhärtung / white residue, pronounced solidification		nicht geeignet / non ok	03.12.13
Kodan wipes	ja / yes	Schülke	Tücher / Tissues	212	weisse Rückstände, starke Verhärtung / white residue, pronounced solidification		nicht geeignet / non ok	10.07.15
Maya Soft	nein / no	QWK-SCS	10%	217	Ok, leichte Verhärtung / Light hardening		Ok, gut abwaschen / rinse it properly	10.05.16
Mikrobac forte	ja / yes	Hartmann	Rein / pure	207	keine Veränderung / no change		Ok, gut abwaschen / rinse it properly	15.04.14
Optisal Plus	ja / yes	Dr. Schumacher GmbH	5%	219	Ok		Ok, gut abwaschen / rinse it properly	15.08.16
Oxivir Plus Spray	ja / yes	Diversey	Rein / pure	205	Ok		Ok	03.12.13



Produkt	Desinfektionsmittel	Hersteller	Lösungskonz.	MLI	Testverlauf	Typ	Eignung	Datum
Power Clean	ja / yes	DKL GmbH	Rein / Pure	198a	Leichte Verfärbung, Verhärtung / Slight discoloration, induration		nicht geeignet / non ok	28.06.13
Power Clean	ja / yes	DKL GmbH	Rein / Pure	198b	Leichte Verfärbung, Verhärtung / Slight discoloration, induration		nicht geeignet / non ok	28.06.13
Antifect Extra	ja / yes	Schülke +	Rein / Pure	190a	Ok		Ok	11.01.13
Antifect Extra	ja / yes	Schülke +	Rein / Pure	190b	Ok		Ok	11.01.13
Detergent Disinfectant Surfaces Hautes (DDSH)	ja / yes	Laboratoires Anios	Rein / Pure	194a	Oberfläche leicht fleckig / Light tracks on surface		Ok	15.02.13
Detergent Disinfectant Surfaces Hautes (DDSH)	ja / yes	Laboratoires Anios	Rein / Pure	194b	Gelbe Verfärbung / Yellowing		nicht geeignet / non ok	15.02.13
Incidin Rapid	ja / yes	Ecolab	5%	192a	Oberfläche fleckig, leichte Verhärtung / Tracks on surface, no hardening		nicht geeignet / non ok	15.02.13
Incidin Rapid	ja / yes	Ecolab	0.05	192b	Gelbe Verfärbung / Yellowing		nicht geeignet / non ok	15.02.13
Mousse Detergente des surfaces	ja / yes	Laboratoires Anios	Rein / Pure	195a	Oberfläche leicht fleckig / Light tracks on surface		Ok	15.02.13
Mousse Detergente des surfaces	ja / yes	Laboratoires Anios	Rein / Pure	195b	Leichte gelbe Verfärbung / Light Yellowing		Ok	15.02.13
Optisal N	ja / yes	Dr. Schumacher	5%	193a	Oberfläche fleckig / Tracks on surface		Ok	15.02.13
Optisal N	ja / yes	Dr. Schumacher	0.05	193b	Starke gelbe Verfärbung / Strong Yellowing		nicht geeignet / non ok	15.02.13
Pro Pad	ja / yes	DKL GmbH	Rein / Pure	197a	Oberfläche leicht fleckig / Light tracks on surface		Ok	15.02.13
Pro Pad	ja / yes	DKL GmbH	Rein / Pure	197b	Gelbe Verfärbung / Yellowing		nicht geeignet / non ok	15.02.13
Rheosept	ja / yes	Wachendorff-Chemie	Rein / Pure	202	Ok		Ok, gut abwaschen / Ok, rinse it properly	09.09.13
Safe Sept	ja / yes	Henry Schein	Rein / Pure	196a	Oberfläche fleckig / Tracks on surface		nicht geeignet / non ok	15.02.13
Safe Sept	ja / yes	Henry Schein	Rein / Pure	196b	Starke gelbe Verfärbung / Strong Yellowing		nicht geeignet / non ok	15.02.13
SteriMax Wipes	ja / yes	Aseptix	Tücher / Tissues	218	Ok		Ok, gut abwaschen / Ok, rinse it properly	02.06.16
Surface Sanitizer	ja / yes	Kay Chemical	Rein / Pure	209	Ok		Ok, gut abwaschen / Ok, rinse it properly	01.10.14



Produkt	Desinfektionsmittel	Hersteller	Lösungskonz.	MLI	Testverlauf	Typ	Eignung	Datum
Terraline Protect	ja / yes	Schülke	5%	213	keine Veränderung / no change		Ok	22.02.16
Terraline Protect	ja / yes	Schülke	0.5%	214	keine Veränderung / no change		Ok	22.02.16
Terraline Protect	ja / yes	Schülke +	Rein / Pure	191a	Oberfläche leicht fleckig und Verhärtung / Tracks on surface , hardening		nicht geeignet / non ok	11.01.13
Terraline Protect	ja / yes	Schülke +	Rein / Pure	191b	Ok, leichte Verhärtung / Light hardening		Ok	11.01.13
Dismozon pur	ja / yes	Hartmann	10%	208	Ok		Ok, gut abwaschen / Ok, rinse it properly	15.04.14
Klercide	ja / yes	ECOLAB	gebrauchsf. Lös. / Ready to use sol.	220	Starke Veränderung, Versteifung des Materials / Substantial change, stiffening of the material	a	nicht geeignet / non ok	13.03.17
Klercide	ja / yes	ECOLAB	gebrauchsf. Lös. / Ready to use sol.	220	keine Veränderung / no change	c	Ok	13.03.17

Die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels muss in allen Fällen nachgeschlagen werden.
Eine Beeinträchtigung des Polstermaterials bei Langzeitanwendung ist nicht ausgeschlossen.
Bitte melden Sie uns solche Fälle.

Test was carried out with the highest recommended concentration applied 10 times.
Instruction of use of cleaning agent must be considered in all cases.
A spoiling of the padding material after long time usage is not impossible.
Please contact us in such cases.

a: Stamskin TOP
c: Stamskin ONE